

FAQ

QU'EST-CE QUE LE TRAITEMENT MIRADRY® ?

Le système miraDry est le seul traitement approuvé par la FDA capable de réduire drastiquement la transpiration des aisselles en s'attaquant non pas aux symptômes, mais à la cause même de la transpiration excessive et des odeurs qui l'accompagnent.

N'AI-JE PAS BESOIN DE MES GLANDES SUDORIPARES ?

Si votre corps a besoin de glandes sudoripares pour se refroidir, il en possède 2 à 4 millions, dont environ 2 % seulement se trouvent sous vos aisselles. Éliminer 2 % de vos glandes sudoripares n'affecte pas la capacité de votre corps à se refroidir. Avec miraDry, vous bénéficierez des nombreux avantages qu'apporte la diminution de la transpiration des aisselles, tout en continuant à transpirer sur d'autres parties du corps.

COMMENT FONCTIONNE CE TRAITEMENT ?

miraDry utilise l'énergie thermique pour générer de la chaleur dans la zone où se trouvent les glandes responsables de la sueur et des odeurs qui posent problème et les follicules pileux, puis les élimine en toute sécurité.

À QUELS RÉSULTATS PUIS-JE M'ATTENDRE ?

Vous pouvez vous attendre à des résultats immédiats et durables.¹ Le traitement miraDry élimine les glandes responsables de la sueur et des odeurs pour de bon. Il est cliniquement prouvé que ce traitement réduit la transpiration de 82 % en moyenne.^{1,4} Comme pour toute intervention esthétique, les résultats et expériences peuvent varier d'un patient à l'autre.

DE COMBIEN DE SÉANCES AI-JE BESOIN ?

Vous pouvez constater des résultats en une seule séance.¹ Cependant, comme pour toute intervention esthétique, votre médecin déterminera le meilleur protocole pour obtenir les résultats souhaités.

COMBIEN DE TEMPS LE TRAITEMENT PREND-IL ?

Un rendez-vous dure généralement environ une heure.¹

LE TRAITEMENT ENTRAÎNE-T-IL DES DOULEURS OU UNE PÉRIODE DE CONVALESCENCE ?

La plupart des patients décrivent la procédure comme indolore, avec peu ou pas de période de convalescence. Pour votre confort, une anesthésie locale est administrée au niveau des aisselles avant le traitement. La plupart des patients retournent immédiatement à leurs activités habituelles (professionnelles ou autres). Le sport peut généralement être repris après quelques jours. Vous pouvez constater un gonflement, un engourdissement, des bleus ou une sensibilité accrue dans la zone des aisselles pendant quelques jours après le traitement.

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

EST-CE SANS DANGER ?

Oui, miraDry a permis de traiter plus de 360 000 personnes dans le monde, avec d'excellents retours en matière de sécurité.³ La FDA l'a également approuvé comme traitement réduisant considérablement la transpiration des aisselles en une seule séance.¹

Y A-T-IL DES EFFETS SECONDAIRES ?

Vous constaterez une douleur ou un gonflement localisé, qui disparaît généralement en quelques semaines. Certains patients connaissent une brève altération des sensations sur la peau des aisselles ou de la partie supérieure des bras, qui disparaît progressivement.

COMBIEN COÛTE LE TRAITEMENT ?

Les prix peuvent varier en fonction du protocole de traitement nécessaire pour obtenir les résultats souhaités. Ils seront abordés lors de la consultation avec votre médecin.

MIRADRY EST-IL PRIS EN CHARGE PAR LES ASSURANCES ?

miraDry n'est généralement pas couvert par les assurances, mais c'est le premier et seul traitement approuvé par la FDA réduisant définitivement la transpiration des aisselles en une seule séance.¹

Rendez-vous sur www.miradry.com pour plus de détails.

References

1. Lupin M, Hong HC, O'Shaughnessy KF. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device (Évaluation de l'efficacité et de la qualité de vie à long terme du traitement de l'hyperhidrose axillaire à l'aide d'un appareil à micro-ondes). *Dermatol Surg.* 2014;40(7):805-807. 2. Taylor NAS, Machado-Moreira CA. Regional variations in transepidermal water loss, eccrine sweat gland density, sweat secretion rates and electrolyte composition in resting and exercising humans (Variations régionales de la perte d'eau transépidermique, de la densité des glandes sudoripares eccrines, des taux de sécrétion de la transpiration et de la composition des électrolytes chez les humains au repos et en activité). *Extrem Physiol Med.* 2013;2:4. 3. Données internes. miraDry, Inc. 4. Hong HC, Lupin M et O'Shaughnessy KF. Clinical evaluation of a microwave device for treating axillary hyperhidrosis (Évaluation clinique d'un dispositif à micro-ondes pour le traitement de l'hyperhidrose axillaire). *Dermatol Surg.* 2012;38(5):728-735.

Le système miraDry est approuvé par la FDA pour le traitement de l'hyperhidrose axillaire primaire (transpiration excessive des aisselles) et l'épilation permanente des aisselles. Il peut aussi réduire les odeurs provenant des aisselles.